



## 1. Schritt - O<sub>2</sub>- Zufuhr öffnen

Sauerstoffflasche am Hauptventil öffnen ① (ca. ¼ Umdrehung), bis das Manometer ② einen Druck anzeigt.  
Achten, dass die Dosierung für die Inhalationsmaske ③ auf 0 steht!



# Kurzanleitung Oxylator® FR-300

## 2. Schritt - O<sub>2</sub> - Fluss öffnen

Goldenen Knopf nach unten drücken ①, mit ¼ Drehung im Uhrzeigersinn arretieren ②. O<sub>2</sub> - Flow wird hörbar.



**Problembehebung auf der Rückseite**



## 3. Schritt - Beatmen

Maske dicht aufsetzen (CE-Griff)  
Kopf überstrecken  
erste Beatmung kann bis 5 sek. dauern.



## 1. Schritt

Durch Zurückziehen des silbrigen, gerippten Steckverbinders löst sich der Oxylatorschlauch von der O<sub>2</sub> Flasche.



## 2. Schritt

Oxylatorsteckverbindung und Wandanschluss durch Zusammenstecken verbinden.



**Es „klappert“ → Atemwege sind verlegt!**

1. Atemwege freilegen
2. Maske wieder aufsetzen und Kopf überstrecken

### Inhaltsberechnung:

Inhalt O<sub>2</sub> = Druck, Manometer (P) x Volumen Inhalt der Flasche (V)

### Beispiel Inhaltsberechnung:

200 kpcm<sup>2</sup> x 2 l Volumen= 400 l

(Verbrauch bei der Beatmung ca.10 l/min. Mit einer vollen Flasche und mit dichter Maske kann man 40 min. beatmen)